

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v
Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

**Prestan Professional Infant - KPR-AED
simulátor kojence s KPR monitorem - sada 4
ks**

Objednací kód: **4115.PPIM400MMS**



Cena bez DPH 19.340,00 Kč

Cena s DPH 23.401,40 Kč

Parametry

Provedení

Množstevní jednotka

Figurína novorozence

ks

Realistické vlastnosti a hmotnost modelu PRESTAN Professional Infant umožňují realistický nácvik KPR kojence. Vytvarované tělesné kontury a na dotek realistická kůže připravuje studenty na reálné případy záchrany života dítěte. Hlava simuluje způsob, jakým by se pohybovala hlava skutečného dítěte. Záklon obličeje/hlavy umocňuje zážitek z nácviku KPR a učí studenty, jak během KPR odblokovat dýchací cesty. Simulátor je vybaven stejnými vlastnostmi KPR odezvy, jako ostatní figuríny dítěte a dospělého série Professional.

Figurína je plně v souladu s aktuálními průmyslovými směrnicemi, včetně nejnovějšího nařízení AHA pro integrovanou odezvu.

Model je dostupný ve středním odstínu kůže pouze s KPR odezvou a v balení po 1 kuse nebo po 4 kusech.

Všechny figuríny PRESTAN pro nácvik KPR jsou vyrobeny v USA.

Další detaily:

Všechny figuríny PRESTAN Professional jsou dostupné s revolučním monitorem frekvence KPR, který umožňuje okamžitou odezvu jak instruktorům, tak studentům. Vizuální odezva z monitoru frekvence KPR poskytuje studentům realistický pocit provedení 100-120 kompresí za minutu. Světélka nepřetržitě signalizují vývoj frekvence a potvrzují tak, že komprese jsou v rozsahu 100-120 kompresí za minutu doporučeném průmyslovými směrnicemi. Žluté světlo bude blikat tehdy, když je překročen horní limit 120 kompresí za minutu, a upozorňuje tak studenty, aby zpomalili. Instruktoři mohou snadno a rychle sledovat několik studentů najednou.

Kromě vizuálního monitoru frekvence KPR studenti také uslyší zvuk cvaknutí, když je hrudník stlačen do správné hloubky 5-6 cm, což jim umožňuje procítit správnou sílu potřebnou k provedení kompresí hrudníku ve skutečných případech.

Monitor KPR frekvence lze zakoupit zvlášť pro vylepšení jakékoli figuríny PRESTAN Professional bez monitoru.

Sleep Mode/No Power	
1st Full Compression (Wake mode/LED Test Mode)	
CPM* < 60	
CPM* 60 – 79	
CPM* 80 – 99	
CPM* 100 - 120	
CPM* > 120	
Compressions Stopped	

*CPM = Compressions per minute

= Flashing

Obsahuje:

- 4 figuríny (světlá barva kůže)
- 4 KPR monitory (se dvěma AA bateriemi)
- 50 plicních vaků
- příručka
- 1 přenosný obal pro všechny figuríny