

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

AirSim Difficult Airway - Simulátor obtížného zajištění dýchacích cest

Objednací kód: **4110.DA91100**



Cena bez DPH 121.320,00 Kč

Cena s DPH 146.797,20 Kč

Parametry

Množstevní jednotka ks

Trenažér pro intubaci dospělého poskytuje řešení pro různé stupně obtíží při nácviku zajištění dýchacích cest. Tento všeobecný model umožňuje simulovat náročné až velmi obtížně intubovatelné scénáře.

Vlastnosti modelu

Obtížně zajistitelné dýchací cesty

- Horní dýchací cesty mají rozšířený jazyk, oteklé zadní chrupavky a prodlouženou epiglottis, což uživatelům poskytuje možnost získání zkušenosti s řešením obtíží dýchacích cest.

Laryngospasmus

- Nastavitelné od normální až po úplnou obstrukci dýchacích cest.
- Lze simulovat náhlé uzavření hlasivek.
- Po úspěšném zásahu uživatele lze laryngospasmus mechanicky zvrátit a poskytnout pozitivní zpětnou vazbu

Posunutý hrtan

- Možnost přemístit hrtan více do přední polohy, aby byla vizualizace hlasivek náročnější.
- Nastavitelné, tak aby bylo možné simulovat různé úrovně obtížnosti.

Edém jazyka

- Jazyk může být oteklý, aby simuloval různé stupně angioedému jazyka.

Ustupující / vyčnívající dolní čelist

- Různé stupně malokluze, jedna mandibulární varianta a dvě maxilární varianty.
- Simulované rysy předkusu a podkusu

Trismus

- Schopnost výrazně omezit otevírání úst, aby bylo zajoštění dýchacích cest obtížnější

Zámek krku / omezení otáčení hlavy

- Schopnost simuloval cervikální artropatií omezením rozsahu pohybu krční páteře
- Zámek krku / omezení otáčení hlavy

Simulujte jehlovou a chirurgickou krikotyreoidotomii a perkutánní tracheostomii.

- Snadná identifikace tracheálních prstenců a kricoidních a laryngeálních chrupavek
- Výměnný hrtan umožňuje rychlé a snadné opakované použití
- Zavinovací vyměnitelná kůže krku použitelní díky možnosti otočení na 10-15 řezů

Figurína AirSim Difficult Airway je kompatibilní s celou řadou supraglotických zařízení. Pro optimální výkon doporučujeme následující velikosti zařízení:

- 7,0-7,5 mm ID pro nosní intubaci
- 8,0-9,0 mm ID pro orální intubaci
- Velikost 3-5 pro LMA laryngeální masky
- Podobné velikosti pro jiná supraglotická zařízení
- Tento trenažér je také vynikajícím demonstračním modelem dýchacích cest pro řízení dýchacích cest a zařízení FONA.

Obsah balení

- 1 AirSim Difficult Airway připravené k použití (DA91100)
- 1 pouzdro AirSim (ABAG01)
- 100ml láhev lubrikantu (TL001)
- 5 larynxových vložek (NLX050 - 1 dodávána na figuríně a 4 náhradní)
- 1 Wraparound Neck Skin (RSN1005 - dodáváno na figuríně)
- 2 sady lepicích podložek (připevnitelné k příslušenství pro zvýšení stability v případě potřeby)